

## LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Circular No. SESVER/LESP/DE/35/2023

Hoja 1/1

Asunto: Criterios de aceptación EDAS.

Veracruz, Ver, 28 de junio del 2023.

### -A LAS 11 JURISDICCIONES -HOSPITALES SESVER -CLIENTES PARTICULARES

2121

Con la finalidad de cumplir con la vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) se da a conocer los criterios de aceptación y/o rechazo de las muestras que se reciben en el Laboratorio Estatal de Salud Pública para el Diagnostico de EBT-M-001 Aislamiento e identificación de *Vibrio cholerae* y EBT-M-002 Aislamiento e identificación de Enterobacterias.

#### TIPO DE MUESTRA:

- Hisopo rectal (se obtiene introduciendo el hisopo en el esfínter anal más de un centímetro y girando el hisopo, el cual debe salir manchado con materia fecal)
- Hisopo fecal (obtenido a partir de una muestra directa de materia fecal)

#### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- **HISOPO RECTAL**
- **Medio de transporte:** Cary Blair
- **Enviar 2 hisopos:** para la búsqueda de *Vibrio spp* se debe tomar un hisopo rectal y para Enterobacterias se debe tomar otro, por lo que deberán enviarse dos hisopados fecales o rectales en medio de transporte de Cary Blair
- **Tiempo de tránsito:** 5 días naturales
- **Temperatura de conservación y transporte a LESP:** no mayor a 30°C, cuando la temperatura ambiente supere los 30°C se recomienda mantener las muestras para su transporte en un ambiente fresco utilizando refrigerantes para asegurar la viabilidad en las muestras

## LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Circular No. SESVER/LESP/DE/35/2023

Hoja 1/1

Asunto: Criterios de aceptación EDAS.  
Veracruz, Ver, 28 de junio del 2023.

- **MATERIA FECAL:**
  - Temperatura optima: Red fría
  - Días de tránsito: 48 horas
  - Contenedor o Recipiente: Frasco boca ancha, tapa de rosca
- Niños menores de 5 años especificar presencia de evacuaciones con sangre y moco para la búsqueda de *Escherichia coli*
- **Documentación requerida**
  - Oficio de solicitud del servicio (incluir listado de las muestras)
  - Solicitud de análisis ERC-F-001
  - Formato que se genera de la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), especificando NUTRAVE/Cólera/Monitoreo 2%
  - Formato único de envío de muestras InDRE.REMU-F-012
- **Transporte de la muestra:** sistema básico de triple embalaje

### CRITERIOS DE RECHAZO:

- Muestras o cepas no identificadas con nombre del paciente o clave
- Muestras o cepas mal identificadas donde el nombre del paciente o clave no coincidan con los listados en el oficio de solicitud del servicio o con los formatos antes mencionados.
- Muestras o cepas que no estén acompañadas de alguno de los formatos mencionados y/o documentación requerida.
- Muestras en medio de transporte Cary Blair caducado, tubo roto, mal sellado, sin medio de transporte o menor cantidad del medio de transporte, fecha de caducidad del medio de transporte ilegible y/o borrado.
- Muestras en medio de transporte que no sea Cary Blair.
- Muestras donde el hisopo rectal no este sumergido hasta el fondo del medio de transporte Cary Blair.
- Muestras congeladas o temperatura  $\geq 30^{\circ}\text{C}$
- Rebase los días de tránsito
- O No cumplan con los criterios de aceptación antes mencionados.
- Para estudios epidemiológicos se puede recibir una sola muestra de hisopo que se priorizará para la búsqueda de *Vibrio cholerae* acompañada de la documentación y especificando en la solicitud de diagnóstico al laboratorio el servicio que se solicita: de vigilancia especial para *Vibrio cholerae* o Vigilancia del cólera en el Sistema monitoreo del 2%.



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

## LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Circular No. SESVER/LESP/DE/35/2023

Hoja 1/1

Asunto: Criterios de aceptación EDAS.

Veracruz, Ver, 28 de junio del 2023.

Se adjunta para su consulta y utilización:

- Lineamientos para la vigilancia por laboratorio de la Enfermedad Diarreica Aguda Bacteriana. InDRE. Abril 2018
- Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGICA.
- ERC-C-001 Toma y envío de muestras biológicas al LESP.
- ERC-F-001 Solicitud de análisis
- REMU F/12-7

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

**M. en C. César Isaac Bazán Méndez**

Director Del Laboratorio Estatal De Salud Pública

C.c.p. **Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores.** -Directora de Salud Pública. -Para conocimiento.  
**Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández.** - Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz. -Mismo fin.  
**Dra. Jessica Kristal Ríos Mercadante.**-Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades. -Mismo fin.  
**Dra. Dulce María Espejo Guevara.** - Jefa De Departamento De Vigilancia Epidemiológica -Mismo fin  
**Dra. Elvira Pino Méndez.** - Encargada de Enfermedades Prevenibles por Vacunación-Mismo fin  
**L.I. José Roberto Ruiz Vega.** -Coordinador de Estadística e Informática. -Para su publicación.  
**Q.C. María Elena Cruz Francisco.** -Coordinadora de Calidad. -Mismo fin.  
**L.A.E. Grecia K. Castañeda Barrios.** -Responsable del Módulo de Servicio al Cliente. -Mismo fin.

ARCHIVO  
JCC/AGA/\*ahd



SERVICIO DE SALUD DE VERACRUZ  
LABORATORIO ESTATAL DE  
SALUD PÚBLICA  
VERACRUZ, VER.

