



LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Circular No. SESVER/LESP/DE/45/2025
Hoja 1/2

Asunto: Lavado de laminillas para el diagnóstico de paludismo y ETV.
Clasificación: 13S.2 Diagnóstico Epidemiológico.
Veracruz, Ver., a 07 de noviembre de 2025.

-A LAS 11 JURISDICCIONES -MICROSCOPISTAS DE LAS 11 JURISDICCIONES -JEFES DEL PROGRAMA ESTATAL DE PALUDISMO PRESENTE.

3147

En seguimiento al reporte y minuta de acuerdos y compromisos de fecha 26 de septiembre del 2025, oficio No. SESVER/DSP/SPyCE/DCET/5307/2025, referente a la visita realizada del 22 al 26 de septiembre por parte del Grupo Técnico Nacional de Paludismo (GTNP); con el objetivo de verificar los avances en la autoevaluación del proceso de verificación subnacional de ausencia de transmisión de Paludismo, así como detectar áreas de oportunidad realizada por el grupo técnico del estado de Veracruz, se menciona:

- En el apartado No. 13 del componente laboratorio menciona: no se lavarán las laminillas para la toma de muestra, como responsable el LESP debe avisar a la red de microscopistas, y programa de vectores.

Como área de oportunidad, se observa el hecho de que no está indicado el lavado de laminillas como se estaba realizando con anterioridad, por lo que se solicita a partir de la fecha se provea al personal tomador de muestras del programa, microscopistas y unidades de salud, laminillas nuevas de calidad para la toma de muestra adecuada.

Para el diagnóstico de paludismo es preciso que los portaobjetos de vidrio sean de calidad "superior" con los bordes pulidos y una banda mate para la identificación de la muestra.

El vidrio de los portaobjetos de calidad "superior" no se empaña ni se vuelve opaco en las condiciones de trabajo en las zonas tropicales; los portaobjetos de calidad "inferior" son más baratos, pero se deterioran rápidamente en los climas cálidos y húmedos, un lavado no elimina dichas manchas, lo que los hace inutilizables para un diagnóstico preciso.



Es importante comprobar que los portaobjetos que se van a emplear en la toma de muestra están libres de rayaduras y limpios, ya que de lo contrario puede afectar en la preparación adecuada de las extensiones de sangre y afecte la integridad y la calidad del diagnóstico.

*Por otro lado, en condiciones de toma de búsqueda activa y pasiva en campo y en unidades médicas que no permita utilizar laminillas lavadas, el portaobjetos se deberá limpiar con una torunda alcoholada y secado con una torunda limpia sin alcohol, evitando dejar residuos en la superficie; tal y como se menciona en el Lineamiento para la vigilancia por laboratorio del Paludismo versión 2024 menciona en el apartado limpieza y conservación de portaobjetos empleados para microscopia pag.57 y 58.

Agradeceré que esta información sea distribuida a los interesados para la realización de las actividades operativas que nos ocupa en este momento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


Atentamente



SERVICIO DE SALUD DE VERACRUZ
LABORATORIO ESTATAL DE
SALUD PÚBLICA
D. en C. Jairo Galot Linaldi
Encargado de la Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública

C.c.p. Dr. Valentín Herrera Alarcón. -Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud. Presente.
Lic. José David Rangel Zermeno. -Director Administrativo. Mismo fin.
Dra. Kathia Guadalupe Rodríguez González -Secretaria Técnica de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.
Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete. -Director de Salud Pública de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.
Dr. Roberto Alonso García Díaz. -Director de Atención Médica de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.
Dra. Dulce María Espejo Guevara. -Jefa del Depto. de Vigilancia Epidemiológica de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.
Biol. Arturo Báez Hernández. - Encargado del departamento de Control de enfermedades transmitidas por vector Mismo fin.
QC. Igrayne Irais Castro Callejas. - Responsable Estatal del programa Paludismo Mismo fin
Lic. Anaís Andrade Hermida. -Jefa del Departamento de Gestión y Control de Recursos. Mismo fin.
L.I. José Roberto Ruiz Vega. -Coordinador de Estadística e Informática. Para su publicación.
Q.C. María Elena Cruz Francisco. -Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad. Mismo fin.
L.A. Fabiola Oliveros Hernández. -Responsable del Módulo de Servicio al Cliente. Mismo fin.
M.E.I.S. Deyanira Barranco Morales. -Jefa de Recepción de Muestras. Mismo fin.

MEIS/MOMM/irp

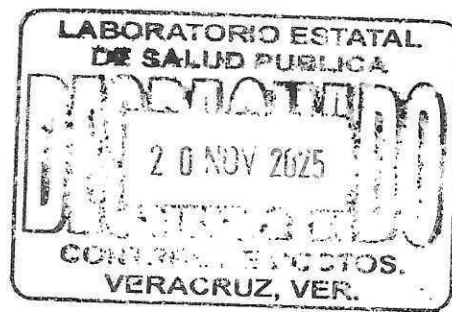

Av Eucalipto S/N Lote 7 Mza. IZC Fracc. Framboyanes
Cd. Industrial Bruno Pagliai
C.P. 91697, Veracruz, Veracruz
Tel. 229 9812951, 229 9811390
<http://www.ssaver.gob.mx/lesp/>

